

## Anleitung zur Probenentnahme

Bitte beachten Sie, dass Speichel als Material nicht geeignet ist, da dieser in der Regel nur wenige intakten Zellen enthält. Wir benötigen daher zur Untersuchung Mundschleimhautzellen.

**Reiben Sie daher bitte sehr kräftig an der Wangeninnenseite!**

### 1. Vorbereitung:

**Bitte entnehmen Sie von jeder zu untersuchenden Person 2 Abstriche!**

Bitte nehmen Sie **mindestens 30 Minuten** vor der Entnahme der Probe keine Speisen und Getränke zu sich. Ansonsten kann es zur Beeinträchtigung der DNA-Analyse kommen.

Entnehmen Sie die Probe bitte **kurz bevor Sie diese an uns verschicken**.

(Bei zu langer Lagerung des feuchten Tupfers kann es ansonsten zu Schimmelbildung kommen, welche die nachfolgende Analyse beeinträchtigt.)

### 2. Auspacken:

**Greifen Sie den Abstrichtupfer immer nur am hinteren Ende (weiße Verschlusskappe) und vermeiden Sie unter allen Umständen ein Berühren des Tupferkopfs!**

### 3. Probenentnahme:

Bitte reiben Sie **jeweils 6 mal** fest mit dem Tupferkopf an der Innenseite einer Wange entlang. (Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten Tupfer an der anderen Wangeninnenseite.)

### 4. Verpacken:

Um das Kontaminationsrisiko so gering wie möglich zu halten, stecken Sie den Tupfer bitte **unverzüglich** nach der Abnahme wieder in die Hülle.

### 5. Beschriftung

Bitte **beschriften Sie den verpackten Tupfer eindeutig mit den Daten** der Person, welcher die Probe entnommen wurde.

### 6. Verschicken

Bitte geben Sie die eindeutig beschrifteten Tupfer in den Versandkarton, versehen Sie diesen mit unserem Adressaufkleber und senden uns das Material zu.

**Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen, damit wir diese in einem persönlichen Gespräch klären können.**